


8

Push breaker toward the rear of scooter. insert key into the switch and turn clockwise to start.

Poussez le disjoncteur vers l'arrière du scooter. insérez la clé dans l'interrupteur et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour démarrer.

Empuje el interruptor hacia la parte trasera del scooter. inserte la llave en el interruptor y gírela en el sentido de las agujas del reloj para comenzar.

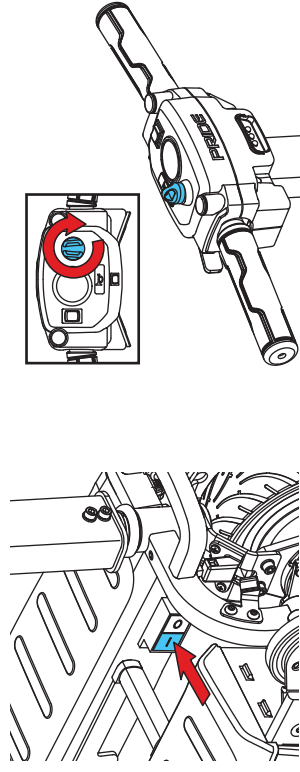

NOTE: To refold scooter, remove key, ensure the manual freewheel lever is in drive mode, and reverse steps 1 through 5.

REMARQUE: Pour replier le scooter, retirez la clé, assurez-vous que le levier manuel de roue libre est en mode de conduite et inversez les étapes 1 à 5.

NOTA: Para volver a plegar el scooter, retire la llave, asegúrese de que la palanca de rueda libre manual esté en modo de conducción e invierta los pasos 1 a 5.



Disassembling Your Scooter (Folded Position) Démontage de votre scooter (Position Pliée) Desmontaje de su scooter (Posición Plegada)


Disengage the Front-to-Rear Latch:
Disengage the front-to-rear latch to unsecure the front and rear sections.

9

Désengagez le loquet avant-arrière:
Dégagez le loquet avant-arrière pour déverrouiller les sections avant et arrière.



Desenganche el pestillo de adelante hacia atrás:
Desenganche el pestillo de adelante hacia atrás para quitar las secciones delantera y trasera.

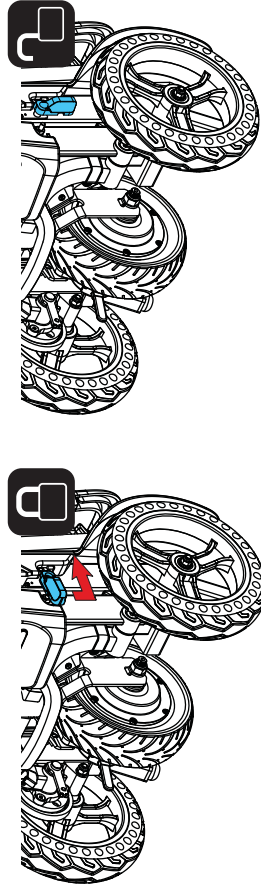


10

Turn both pivot pins 90° so they are horizontal to ground.

Tournez les deux axes de pivot de 90° afin qu'ils soient horizontaux par rapport au sol.

Gire ambos pasadores de pivote 90° para que queden horizontales al suelo.

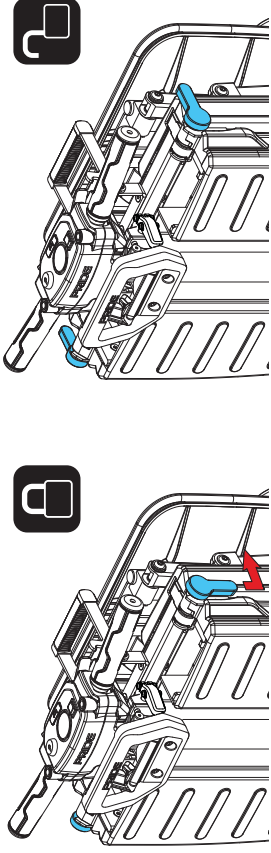


11

Lift the front section of the scooter up and away from the rear.

Soulevez la partie avant du scooter vers le haut et loin de l'arrière.

Levante la sección delantera del scooter y retírela de la parte trasera.

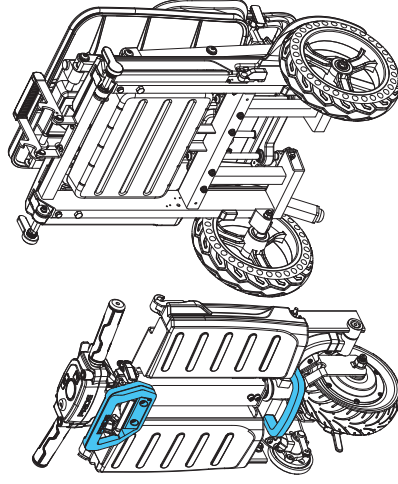

NOTE: To reassemble scooter, reverse steps 9 through 11.

REMARQUE: Pour remonter le scooter, inversez les étapes 9 à 11.

NOTA: Para volver a armar el scooter, invierta los pasos 9 a 11.

9 10 11



PRIDE
MOBILITY

www.pridemobility.com

Document Information: Rev B/Sept 2022





ACN 088 609 661



CH REP



Quick Start Guide Guide de démarrage rapide Guía de inicio rápido

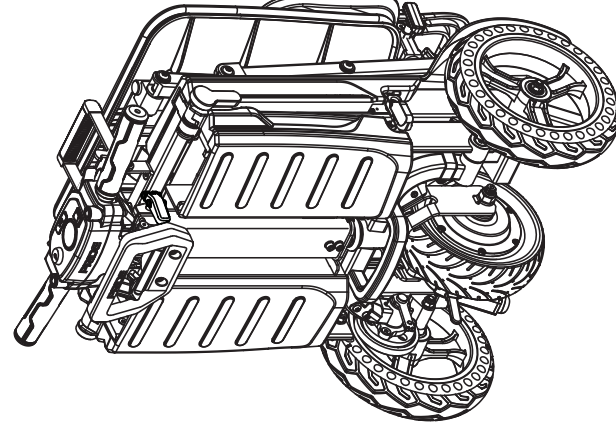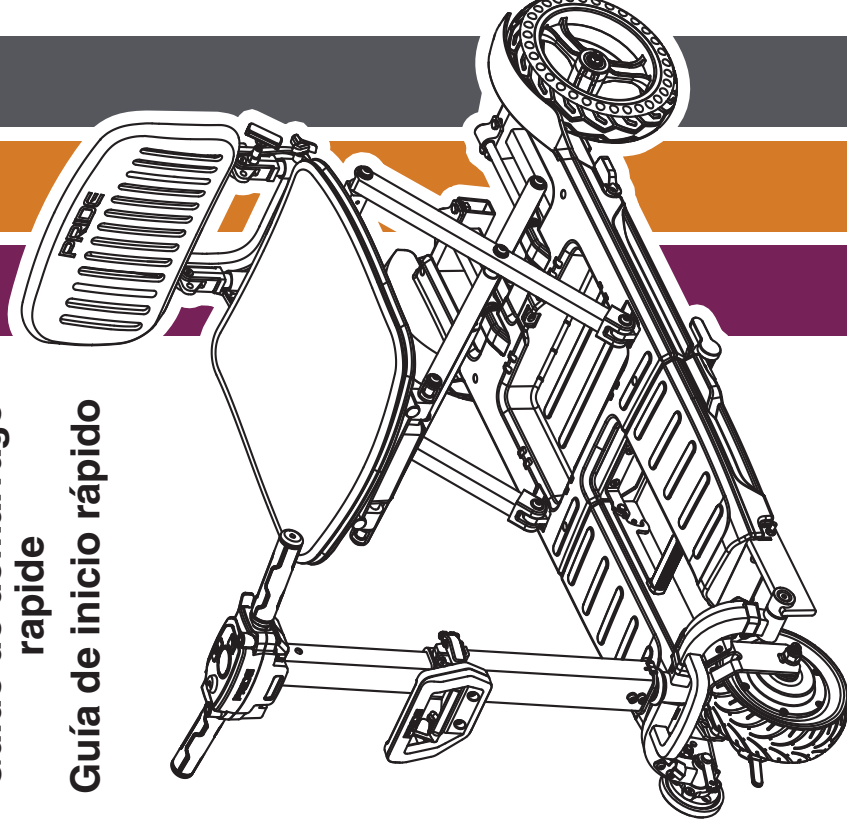


PRIDE
MOBILITY

Unfolding Your Scooter • Déplier votre trottinette Desplegando su scooter

1


- Raising the Tiller:**
Raise the tiller by pulling the tiller adjustment lever.
Relever la barre:
Soulevez le timon en tirant sur le levier de réglage du timon.
Levantando el timón:
Levante el timón tirando de la palanca de ajuste del timón.

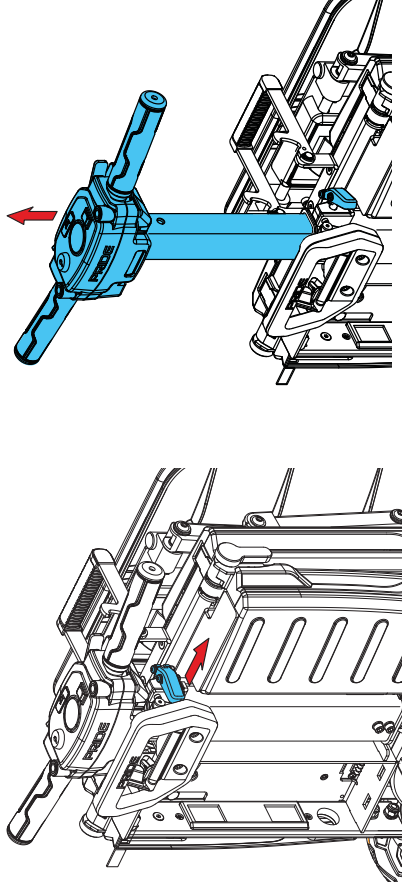

2

- Disengage the Front-to-Rear Latch:**
Disengage the front-to-rear latch to unsecure the front and rear sections.
Désengagez le loquet avant-arrière:
Dégagez le loquet avant-arrière pour déverrouiller les sections avant et arrière.

Desenganche el pestillo de adelante hacia atrás:
Desenganche el pestillo de adelante hacia atrás para quitar las secciones delantera y trasera.

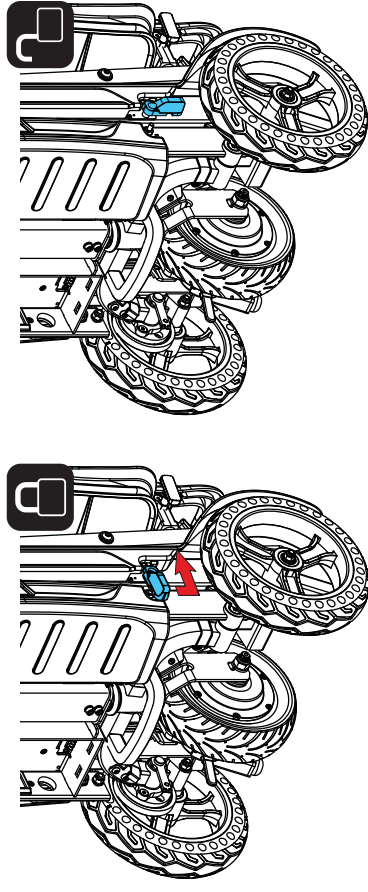


3

- Unfolding the Front and Rear Selections:**
While holding the main pivot handle, squeeze the tiller release handle and guide it forward and away from the rear section of the scooter until it is in the driving position.

Dépliage des sélections avant et arrière:
Tout en tenant la poignée pivotante principale, pressez la poignée de déverrouillage de la barre et guidez-la vers l'avant et à l'écart de la section arrière du scooter jusqu'à ce qu'elle soit en position de conduite.

Despliegue de las selecciones delantera y trasera:
Mientras sostiene el mango de pivote principal, apriete el mango de liberación del timón y guíelo hacia adelante y alejándolo de la sección trasera del scooter hasta que esté en la posición de conducción.

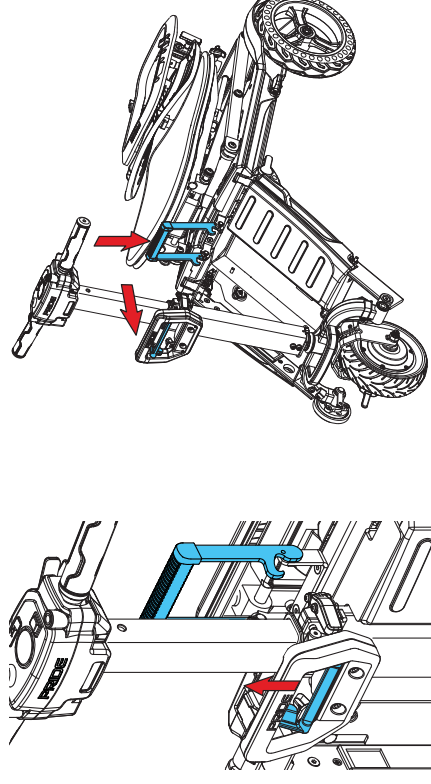


4

- Unfolding the Seat:**
Squeeze the seat release and then lift up on the seat until it is fully raised and in driving position.
WARNING! Ensure the seat is fully raised and secured in driving position prior to sitting on your scooter. Failure to do so may result in property damage and/or personal injury.

Dépliage du siège:
Appuyez sur le déverrouillage du siège, puis soulevez le siège jusqu'à ce qu'il soit complètement relevé et en position de conduite.
ATTENTION! Assurez-vous que le siège est complètement relevé et fixé en position de conduite avant de vous asseoir sur votre scooter. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages matériels et/ou des blessures corporelles.

Desplegando el asiento:
Apriete la liberación del asiento y luego levante el asiento hasta que esté completamente levantado y en la posición de conducción.

¡ADVERTENCIA! Asegúrese de que el asiento esté completamente levantado y asegurado en la posición de conducción antes de sentarse en su scooter. El no hacerlo puede resultar en daños a la propiedad y/o lesiones personales.

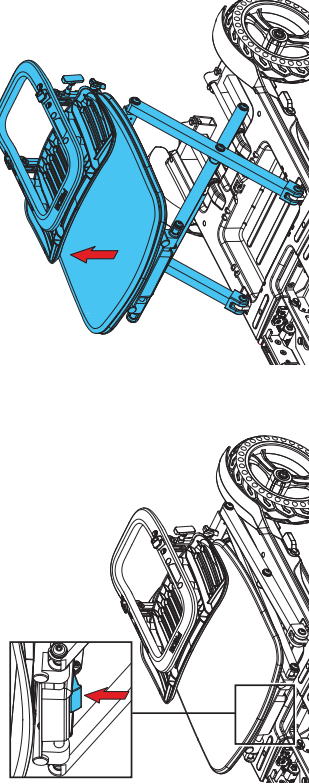

5


- Unfolding the Seat Back:**
Pull the locking pin and unfold the seat back to an upright position.

Déplier le dossier du siège:
Tirez sur la goupille de verrouillage et déployez le dossier du siège en position verticale.

Desplegando el respaldo del asiento:
Tire del pasador de bloqueo y despliegue el respaldo del asiento hasta una posición vertical.

6

- After Unfolding Scooter:**
Ensure the manual freewheel lever is in drive mode.
Après avoir déplié le scooter:
Assurez-vous que le levier manuel de roue libre est en mode de conduite.
Después de desplegar el scooter:
Asegúrese de que la palanca de rueda libre manual esté en modo de conducción.

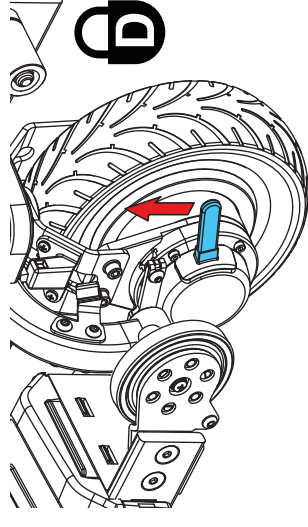

7

- Install the Battery Pack:**
Align the tabs on the new battery with the alignment holes. Press down on the battery pack until you hear a "click."
NOTE: Ensure the battery strap is kept outside the battery compartment when installing the battery.

Installez la batterie:
Alignez les languettes de la nouvelle batterie avec les trous d'alignement. Appuyez sur la batterie jusqu'à ce que vous entendiez un "clic".
REMARQUE: Assurez-vous que la sangle de la batterie est maintenue à l'extérieur du compartiment de la batterie lors de l'installation de la batterie.

Instale el paquete de baterías:
Alinee las pestañas de la batería nueva con los orificios de alineación. Presione el paquete de baterías hacia abajo hasta que escuche un "clic".
NOTA: Asegúrese de que la correa de la batería se mantenga fuera del compartimento de la batería al instalar la batería.

